

REDUXCEL MAX

MAX SLIM

TRATAMENTO REDUTOR COM ULTRASSOM

PROTOCOLO

- 1 PREPARO DA PELE: Aplicar uma solução de **Sabonete Glico-Ativo** na proporção: 15ml de **Sabonete Glico-Ativo** em 250ml de água em um borrifador. Aplique sobre a região a tratar e deixe agir por 3 minutos. Remova com água. Este procedimento aumenta a permeação e absorção dos ativos, otimizando os resultados de todo o programa.
- 2 REATIVAÇÃO CELULAR REDUTORA: Aplique nas regiões de gordura localizada **Lipo-Force Max**. Massageie até completa absorção.
- 3 REATIVAÇÃO CELULAR FIRMANTE: Aplique nas regiões de flacidez **Nano Firm**. Massageie até completa absorção.
- 4 ULTRASSOM DE ALTA POTÊNCIA: Sobre os Reativadores, aplique o **Gel Condutor Sonogel Stetic** e proceda de acordo com a orientação do fabricante.
- 5 MASSAGEM: Aplique **Creme de Massagem Drain Redux** através da Drenagem Linfática ou Massagem Modeladora, conforme o programa de tratamento. Acessórios para massagem podem ser associados.

